
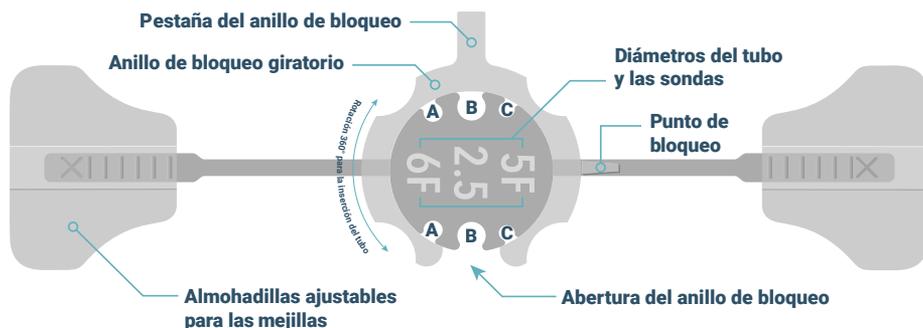


1. Asegure la vía aérea del bebé.
2. Consulte la guía de especificaciones del producto para encontrar el tamaño adecuado de ArcAngel.
3. Aplique las almohadillas para las mejillas directamente delante de las orejas e inserte los brazos del ArcAngel en las almohadillas para las mejillas y hágalos avanzar para conseguir un ajuste personalizado O coloque primero las almohadillas para las mejillas en el arco y, luego, aplíquelas sobre la piel.
4. Abra el anillo de bloqueo giratorio hasta la abertura del tubo endotraqueal y presione el tubo en la ranura desde la base hacia arriba hasta que quede bien sujeto en la ranura. Gire el anillo exterior hasta el punto de bloqueo para fijar el tubo en su lugar.
5. Si se requiere una sonda de alimentación o de aspiración gástrica, introduzca la sonda al paciente, gire el anillo de bloqueo exterior hasta la abertura correspondiente, coloque la sonda en la ranura y gire el anillo exterior hasta el punto de bloqueo para fijar las sondas en posición.
6. Para ajustar cualquier sonda, abra el anillo de bloqueo exterior hasta la abertura deseada, avance o retroceda la sonda mientras permanece fija en la ranura, utilizando las marcas de 0,25 cm como guía, y bloquee el anillo exterior.
7. En caso de emergencia o para una extubación de prueba, el ArcAngel puede retirarse sujetando las almohadillas para las mejillas en su posición, halando suavemente del ArcAngel hacia fuera de las almohadillas para las mejillas, dejando intactas las almohadillas y cualquier sonda adicional. El mismo ArcAngel puede volver a insertarse en las almohadillas para las mejillas a fin de hacer un uso continuado, por si fuera necesario.

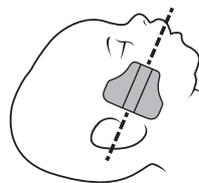

Sujetadores: A. Sonda de aspiración gástrica* B. Tubo endotraqueal* C. Sonda de alimentación*

* En la tabla que consta a continuación se pueden observar las combinaciones de tamaños de los sujetadores de tubos

Peso del bebé	Tamaño	Tamaño del tubo endotraqueal	Diámetro exterior del tubo endotraqueal (rango de adjust)	Tamaño de la sonda de alimentación	Tamaño de la sonda de aspiración gástrica
≤1000 g	0	2.5 mm	3.3 - 3.7 mm	5 Fr	6 Fr
1001-2500 g	1	3.0 mm	4.0 - 4.5 mm	6.5 Fr	8 Fr
2501-4000 g	2	3.5 mm	4.5 - 5.0 mm	6.5 Fr	10 Fr
4001 g o más	3	4,0 mm	5.0 - 5.5 mm	6.5 Fr	10 Fr