
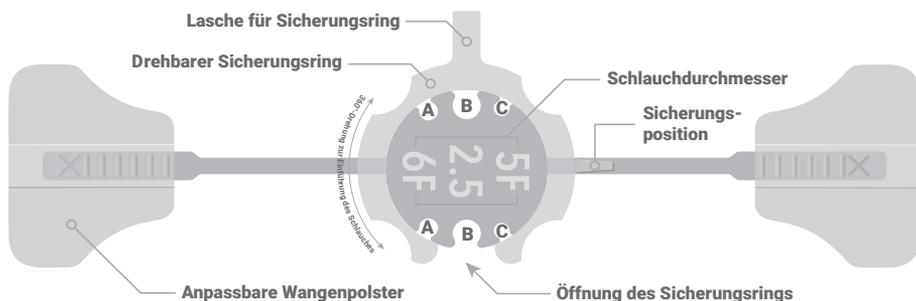


1. Atemwege des Babys sichern.
2. Wählen Sie anhand der Anleitung in den Produktspezifikationen die richtige ArcAngel-Größe.
3. Die Wangenpolster werden nach einer der beiden nachstehend beschriebenen Methoden angebracht:
 - a. Platzieren Sie die Wangenpolster direkt vor dem Ohr, so dass sie zur Oberlippe zeigen und der ArcAngel an der Oberlippe ausgerichtet eingeführt werden kann (siehe Abbildung rechts).
 - b. Wangenpolster zuerst am ArcAngel befestigen und dann wie oben beschrieben an der Oberlippe ausrichten.
4. Den Sicherungsring drehen, bis die ETT Öffnung frei ist und den Schlauch von unten nach oben in die Kerbe drücken, bis er fest in der Kerbe sitzt. Dann den äußeren Ring in die Verriegelungsposition drehen, um den Schlauch zu sichern.
5. Wenn eine Ernährungssonde oder eine Absaugsonde erforderlich ist, den Schlauch in den Patienten einführen, den äußeren Verriegelungsring in die entsprechende Öffnung drehen, den Schlauch in die Kerbe einführen und den äußeren Ring in die Verriegelungsposition drehen, um die Schläuche zu sichern.
6. Zum Justieren eines Schlauches den äußeren Sicherungsring an der entsprechenden Öffnung öffnen und den Schlauch tiefer einführen bzw. ein Stück herausziehen, **wobei der Schlauch in der Kerbe sicher gehalten wird**. Die im Abstand von 0,25 cm angebrachten Kerben dienen dabei als Orientierungshilfe. Anschließend den äußeren Ring schließen.
7. Im Notfall oder für eine Probeextubation kann der ArcAngel entfernt werden, indem man die Wangenpolster festhält und den ArcAngel vorsichtig aus den Wangenpolstern herauszieht, ohne die Polster oder andere Schläuche zu beschädigen. Bei Bedarf kann der gleiche ArcAngel wieder in die Wangenpolster eingesetzt werden.
8. **Zur Entfernung der Wangenpolster:** Wischen Sie die Oberfläche des Klebepads großzügig mit Nurse Angele's Wipes oder einem Klebstoffentferner Ihrer Wahl ab. Den Klebstoffentferner vollständig einwirken lassen. Dann eine Ecke des Pads nach oben ziehen und weiter über den Bereich zwischen Haut und Klebstoff wischen, während das Wangenpolster vorsichtig abgezogen wird.

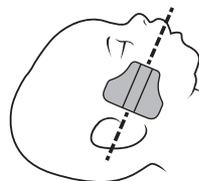

Tubushalter: A. Ernährung und Magenabsaugung B. Endotracheal C. Ernährung und Magenabsaugung

Größe	ETT	Passbereich ETT-Außendurchmesser	Magenabsaug-/Ernährungs sondengrößen	
			A	C
0	2,5 mm*	3,3-3,7 mm	CH 5	CH 6**
1	3,0 mm	4,0-4,5 mm	CH 6.5	CH 8**
1x***	3,0 mm	4,0-4,5 mm	CH 6.5	CH 10
2	3,5 mm	4,5-5,0 mm	CH 6.5	CH 10
3	4,0 mm	5,0-5,5 mm	CH 6.5	CH 10

* Die Verwendung eines CH5 Absaugkatheters wird empfohlen.

** Befestigung von Edi-Kathetern der Größen CH 6 und CH 8 ist möglich.

*** ArcAngel derselben Größe wie Größe 2

- ArcAngel ist eine sichere, verstellbare und multifunktionale Halterung für neonatale und pädiatrische Endotrachealtuben.
- WIE BEI JEDER VORRICHTUNG ZUR FIXIERUNG EINES ENDOTRACHEALTUBUS BESTEHT DIE GEFAHR, DASS DER TUBUS VERRUTSCHT ODER DIE HAUT GEREIZT WIRD.
- NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN. DIE VERWENDUNG AN EINEM WEITEREN PATIENTEN BIRGT DAS RISIKO EINER INFektionsÜBERTRAGUNG UND EINER SCHLECHTEN LEISTUNG DER VORRICHTUNG UND DES KLEBSTOFFS.
- ARC KANN RECYCELT ODER ENTSORGT WERDEN.
- WANGENPOLSTER ENTSORGEN (NICHT RECYCELBAR).



Vor
Sonnenlicht
schützen.



Trocken
lagern.



Nicht bei einem
weiteren Patienten
wiederverwenden.



Gebrauchsanleitung
beachten.



Vorsichtsmaßnahmen
und Warnhinweise
siehe
Gebrauchsanleitung.



Produkt enthält kein
Naturkautschuklatex.



Produkt enthält
keine DEHP-
Weichmacher.



Verschreibungspflichtig.



warriorNP™

2211 South Telegraph Road
Suite #7230
Bloomfield Hills, MI 48302
USA

Aktualisiert: März 2024