
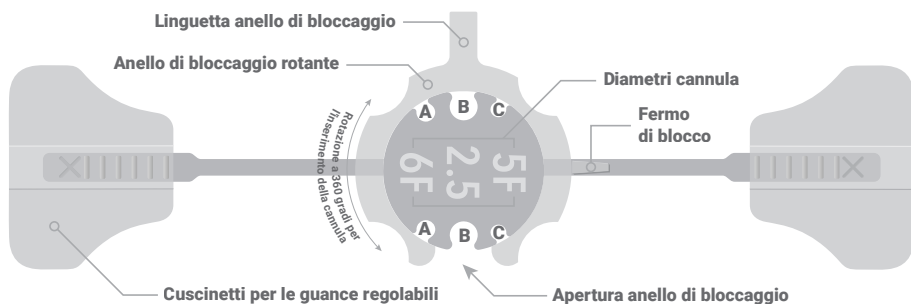


1. Assicurare le vie aeree del neonato.
2. Utilizzare la guida alle specifiche del prodotto per individuare la misura di ArcAngel più adatta.
3. Posizionare i cuscinetti per le guance utilizzando uno dei due metodi:
 - a. Posizionare i cuscinetti per le guance direttamente davanti all'orecchio, in direzione del labbro superiore, in modo che il dispositivo ArcAngel possa essere allineato con il labbro superiore (vedi schema a destra).
 - b. Collocare per prima cosa i cuscinetti sull'arco, quindi applicare come sopra, allineando con il labbro superiore.
4. Aprire l'anello di bloccaggio rotante in corrispondenza dell'apertura della cannula endotracheale e premere il tubo nella scanalatura dalla base, quindi procedere verso l'alto fino a quando la cannula non è fissata nella scanalatura. Ruotare l'anello esterno fino alla posizione di blocco per fissare la cannula in posizione.
5. Se è necessario un sondino di alimentazione o di aspirazione gastrica, inserire la cannula nel paziente, ruotare l'anello di bloccaggio esterno fino all'apertura appropriata, inserire la cannula nella scanalatura e ruotare l'anello esterno fino alla posizione di blocco per fissare le cannule in posizione.
6. Per regolare la cannula, aprire l'anello di bloccaggio esterno fino all'apertura desiderata, far avanzare o ritrarre la cannula **mentre rimane fissata nella scanalatura**, utilizzando i trattini da 0,25 cm come guida, e bloccare l'anello esterno.
7. In caso di emergenza o per un'estubazione di prova, il dispositivo ArcAngel può essere rimosso tenendo i cuscinetti per guance in posizione, estraendo delicatamente il dispositivo ArcAngel e lasciando intatti i cuscinetti ed eventuali cannule aggiuntive. Lo stesso dispositivo ArcAngel può essere reinserito nei cuscinetti per un uso continuativo, qualora necessario.
8. **Per rimuovere i cuscinetti per le guance:** Strofinare generosamente la superficie esterna dell'adesivo con Ple salviettine Nurse Angele's o con un antiadesivo a scelta, aspettando il tempo necessario per la completa saturazione dell'adesivo. Sollevare quindi delicatamente un angolo del cuscinetto e pulire continuamente l'interfaccia pelle/adesivo, staccando delicatamente il cuscinetto per le guance.

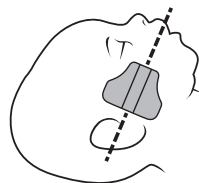

Supporti per le cannule: A. Alimentazione e Aspirazione Gastrica B. Endotracheale C. Alimentazione e Aspirazione Gastrica

Misura	Cannula endotracheale	D.E. cannula endotracheale - Gamma montaggio	Misure sondino di alimentazione e di aspirazione gastrica	
			A	C
0	2,5 mm*	3,3 - 3,7 mm	5 F	6 F**
1	3,0 mm	4,0 - 4,5 mm	6,5 F	8 F**
1x***	3,0 mm	4,0 - 4,5 mm	6,5 F	10 F
2	3,5 mm	4,5 - 5,0 mm	6,5 F	10 F
3	4,0 mm	5,0 - 5,5 mm	6,5 F	10 F

* Si raccomanda un catetere di aspirazione in linea da 5 F.

** Fissa cateteri EDI da 6 F e 8 F.

*** Stessa dimensione dell'arco della misura 2

- ArcAngel è un supporto per cannula endotracheale neonatale e pediatrica sicuro, regolabile e multifunzionale
- COME PER QUALSIASI DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DELLA CANNULA ENDOTRACHEALE, ESISTE IL RISCHIO DI DISLOCAZIONE DELLA CANNULA O DI IRRITAZIONE CUTANEA.
- USO MONOPAZIENTE. I RISCHI DERIVANTI DALL'USO SU UN ALTRO PAZIENTE INCLUDONO LA TRASMISSIONE DI INFEZIONI E LE PRESTAZIONI SCADENTI DEL DISPOSITIVO E DELL'ADESIVO.
- L'ARCO PUÒ ESSERE RICICLATO O SMALTITO.
- SMALTIRE I CUSCINETTI PER LE GUANCE (NON RICICLABILI).



Tenere lontano dalla luce solare



Conservare in un luogo asciutto



Non riutilizzare con un altro paziente



Consultare le istruzioni per l'uso



Consultare le istruzioni per l'uso per avvertenze e precauzioni



Non prodotto con lattice di gomma naturale



Non prodotto con plastificante DEHP



Solo su prescrizione



warriorNP™

2211 South Telegraph Road
Suite 7230
Bloomfield Hills, MI 48302
Stati Uniti