

Tubushalter: A. Magenabsaugung* B. Endotracheal* C. Ernährung*

Anleitung Spezifikationen


Größe	ETT	ETT-Außendurchmesser Passbereich	Magenabsaug-/Ernährungssondengrößen	
			A	C
0	2,5 mm*	3,3-3,7 mm	CH 5	CH 6**
1	3,0 mm	4,0-4,5 mm	CH 6,5	CH 8**
1x***	3,0 mm	4,0-4,5 mm	CH 6,5	CH 10
2	3,5 mm	4,5-5,0 mm	CH 6,5	CH 10
3	4,0 mm	5,0-5,5 mm	CH 6,5	CH 10

* Die Verwendung eines CH5 Absaugkatheters wird empfohlen. ** Befestigung von Edi-Kathetern der Größen CH 6 und CH 8 ist möglich. *** ArcAngel derselben Größe wie Größe 2.


ArcAngel der Größe 1x sind gleich groß wie Größe 2, es werden damit jedoch 3,0-mm-ETTs befestigt, damit sie für größere Babys, die kleinere ETTs benötigen, geeignet sind.

Anbringung des ArcAngel und der Wangenpolster

1. Atemwege des Babys sichern.
2. Wählen Sie anhand der obigen Anleitung auf Grundlage der Sondengrößen und entsprechenden Bogengrößen die richtige ArcAngel-Größe aus.
3. Bringen Sie die Wangenpolster zunächst am ArcAngel an und platzieren Sie sie direkt vor den Ohren, wobei sich Bogen und Gehäuse über der Oberlippe befinden (siehe Abbildung rechts). *Tipp: Halten Sie die Wangenpolster mit beiden Händen und wölben Sie sie etwas nach außen, während Sie sie auf der sauberen und trockenen Haut anbringen.*
4. Den Sicherungsring drehen, bis die ETT-Öffnung frei ist und den Schlauch von unten (A) nach oben nach und nach in die Kerbe drücken (B), bis er fest in der Kerbe (C) sitzt. Dann den äußeren Ring in die Verriegelungsposition drehen, um den Schlauch zu sichern.
5. Wenn eine Ernährungssonde oder eine Magenabsaugsonde erforderlich ist, den Schlauch in den Patienten einführen, den äußeren Verriegelungsring in die entsprechende Öffnung drehen, den Schlauch in die Kerbe einführen (wie in Schritt 4) und den äußeren Ring in die Verriegelungsposition drehen, um den Schlauch zu sichern.
6. Zum Justieren eines Schlauches den äußeren Sicherungsring an der entsprechenden Öffnung öffnen und den Schlauch tiefer einführen bzw. ein Stück herausziehen, **wobei der Schlauch in der Kerbe sicher gehalten wird**. Die im Abstand von 0,25 cm am Ring angebrachten Kerben dienen dabei als Orientierungshilfe. Anschließend den äußeren Ring schließen.

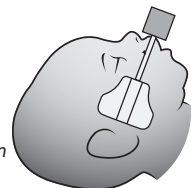


Ideale Ausrichtung

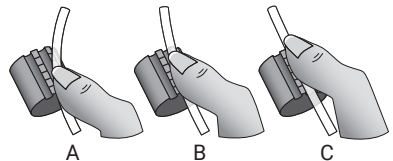

FORTGESETZT

7. Im Notfall oder für eine Probeextubation kann der ArcAngel entfernt werden, indem man die Wangenpolster festhält und den ArcAngel vorsichtig aus den Wangenpolstern herauszieht, ohne die Polster oder andere Schläuche zu beschädigen. Bei Bedarf kann der gleiche ArcAngel wieder in die Wangenpolster eingesetzt werden.

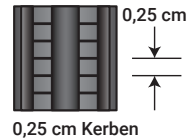


8. **Zur Entfernung der Wangenpolster:** Wischen Sie die Oberfläche des Klebepads großzügig mit Nurse Angele's Wipes oder einem Klebstoffentferner Ihrer Wahl ab. Den Klebstoffentferner vollständig einwirken lassen. Dann eine Ecke des Pads nach oben ziehen und weiter über den Bereich zwischen Haut und Klebstoff wischen, während das Wangenpolster vorsichtig abgezogen wird.
9. Ersetzen Sie die Wangenpolster, wenn sie nicht mehr haften. **Hinweis: Beide Wangenpolster-Größen sind mit allen ArcAngel-Größen kompatibel.**
10. **Um die Wangenpolster zu ersetzen:** Während eine Person den ETT hält, den Bogen von den beiden Wangenpolstern entfernen, die beiden Polster auf der Haut austauschen und den ArcAngel dann in die neuen Wangenpolster einführen.


Anwendungshinweise

- Die Person, die den ArcAngel anbringt, sollte sich am Kopfende des Bettes befinden.
- Bei einem Gesichtsoedem kann der ArcAngel weiter oben und außerhalb der Wangenpolster befestigt werden, um die Schwellung zu berücksichtigen. Die Einkerbungen an den Armen des ArcAngel haben einen Abstand von 0,25 cm zueinander. Falls die Anpassung eines Arms erforderlich ist, führen Sie zunächst den ETT ein und passen Sie den ArcAngel dann am Gesicht an. Prüfen Sie dann die Position des ETT erneut.


- Korrekte Einführung des ArcAngel in die Wangenpolster
 - Stellen Sie sicher, dass die Arme des ArcAngel sicher in Position sind, indem Sie sie vollständig in die Wangenpolster-Kanäle einführen. Dank der gekerbten Enden halten die Arme fest in den Kanälen.
Siehe Abbildung rechts.

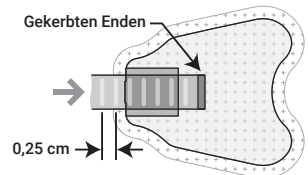

- Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen ETT-Außendurchmesser werden Klebestreifen mitgeliefert, um einen sicheren Halt im ArcAngel zu gewährleisten.

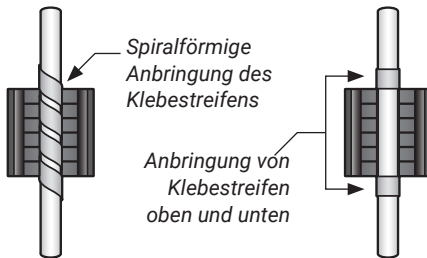

Durch das Anbringen von Klebestreifen wird eine zusätzliche Zugkraft von bis zu 70 % geboten.

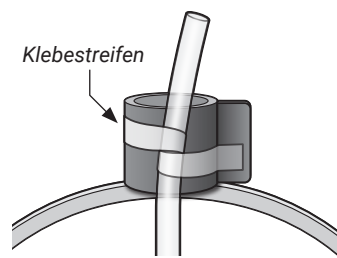

Verwenden Sie Klebestreifen, um Schläuche einer anderen Größe an der Seite des äußeren Rings zu befestigen.

ARCANGEL UND WANGENPOLSTER SIND ZUR ANWENDUNG BEI EINEM EINZELNEN PATIENTEN GEDACHT

Hersteller: WarriorNP
2211 South Telegraph Rd
Suite #7230, Bloomfield Hills, MI 48302,

USA UKRP: AF Pharma Service UK Ltd
Suite 140 Temple Chambers, 3-7,
Temple Avenue,
London, EC4Y 0DA, England, Vereinigtes
Königreich



EUAR: AF Pharma Service Europe SL
Muntaner 281, 08021, Barcelona,
Spanien