



Pacifiers are clean and ready for single patient use.

Les sucettes sont propres et prêtes à être utilisées par un seul patient.

Select pacifier size.

Sélectionnez la taille de la sucette.



NUMI-0



NUMI-1



Offer pacifier in an infant's open mouth, under the oral endotracheal or feeding tube. The shield should be flush against the infant's face, under the endotracheal tube holder.

Offrez une sucette dans la bouche ouverte d'un nourrisson, sous le tube endotrachéal oral ou le tube d'alimentation. La protection doit être à ras du visage du nourrisson, sous le support du tube endotrachéal.



- Replace pacifier when visibly worn or soiled.
- Never tie a pacifier to the endotracheal tube or holder or around a child's neck or hand, as this poses a strangulation hazard.
- Do not cut or alter pacifier in any way.
- Remplacez la sucette lorsqu'elle est visiblement usée ou sale.
- Ne attachez jamais une tétine à un tube endotrachéal ou à un support, ni autour du cou ou de la main d'un enfant, car cela peut poser un risque d'étranglement.
- Ne coupez pas ni ne modifiez la tétine de quelque manière que ce soit.



warriorNP.com

**warriorNP**<sup>TM</sup>

Safer Survival Tools for Little **Warriors**.

2211 South Telegraph Road, Suite #7230  
Bloomfield Hills, MI 48302

